



MEDIDOR DE ALTURA PUPILAR

Medir a altura pupilar ficou mais fácil e seguro

Pensando mais uma vez em facilitar o seu dia-a-dia e garantir que seu trabalho fique ainda melhor, a Essilor Solutions decidiu desenvolver uma ferramenta perfeita para medir a altura pupilar.



RECURSOS E BENEFÍCIOS

Trata-se de um aparelho que, quando acoplado à armação escolhida pelo cliente, auxiliará você a medir a altura pupilar de maneira rápida e precisa. Ele garantirá excelentes resultados durante o processo de tomada de medidas e os usuários de óculos sentirão essa diferença. Por usufruir de uma tecnologia de ponta, todos terão muito mais confiança no seu estabelecimento. Invista em um diferencial e diga adeus aos métodos tradicionais que dão margem a erros.

DADOS TÉCNICOS

Instruções de Operação

1. Assegure-se primeiramente de que a armação esteja corretamente ajustada ao rosto do usuário. Segure o MHP por meio dos pinos e dos apoios de dedo, abrindo os dois cliques móveis.
2. Cuidadosamente, acople o aparelho à armação utilizando os elementos de fixação e ajuste, movendo os cliques na parte inferior da armação.
3. Centralize o eixo do aparelho. Posicione a linha branca no centro da pupila, utilizando os dois botões giratórios nas laterais do aparelho. Leia a graduação tangencial na parte inferior da armação e anote a altura pupilar, levando em conta a profundidade da faceta.

Obs.: É aconselhável efetuar o processo de tomada de medidas em ambas as posições — sentado e em pé —, para a obtenção de uma média de altura confiável.